




راهنمای کار با دستگاه الکتروشوک NIHON KOHDEN مدل TEC-5521/5531

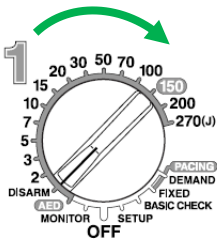

۱- در ابتدا با چرخاندن کلید سلکتوری در جهت عقربه های ساعت همزمان دستگاه روشن شده و می توانید انرژی مورد نظر را انتخاب نمایید و دستگاه آماده شارژ می باشد.

۲- با فشردن کلید شماره 2 (Charge) که هم به روی بدنه و هم روی پدل طراحی شده است ، دستگاه شارژ می گردد. دستگاه در مدت ۳ ثانیه ۲۰۰J و در مدت ۵ ثانیه ۲۷۰J را شارژ می نماید.

۳- جهت دشارژ کلیدهای شماره 3 را بر روی بدنها همزمان فشار دهید تا تخلیه الکتریکی صورت گیرد.

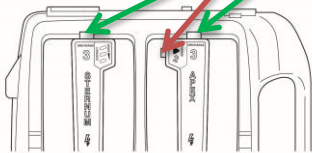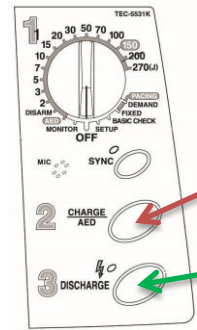

* شوک دادن سینکرونایز:

- ❖ دقت داشته باشید زمانی از کلید Sync می‌توانید استفاده نمایید که بیمار دارای ریتم قلبی باشد.
- کابل ECG را به بیمار متصل نمایید. (یا با تغییر آیکون Lead در حالت Monitor آن را بر روی PADDLE قرار دهید.)
- با فشردن دکمه Sync حالت سینکرونایز را فعال می‌نماییم. در این حالت کلمه Sync بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود و نشانگر موج QRS نیز روی صفحه نمایش به شکل خط چین ظاهر می‌شود.
- بقیه مراحل مانند شوک غیر سینکرونایز است.

* مراحل انجام تست روزانه الکتروشوک:

